



Rammen ECG (EKG)



| Artikel | Beskrivelse | Artikel | Beskrivelse |
|---------|--|---------|--|
| 1 | Rammen ECG (EKG) | 7 | Filterbetegnelse |
| 2 | Valg af og betegnelse for afledning (den grønne afledning vises) | 8 | Hjertefrekvens-/pulsfrekvensbetegnelse |
| 3 | EKG-gitter | 9 | Alarmgrænseknapper for hjertefrekvens/pulsfrekvens |
| 4 | EKG-kurveform | 10 | Betegnelse for kilde til hjertefrekvens/pulsfrekvens |
| 5 | Betegnelse for indstilling af forøgelse | 11 | Knap til start/stop af EKG |
| 6 | Betegnelse for sweep hastighed | 12 | Knap til snapshot af kurveform |

Rammen Respiration Rate (Respirationsfrekvens)



| Artikel | Beskrivelse |
|---------|--|
| 1 | Rammen Respiration Rate (Respirationsfrekvens) |
| 2 | Betegnelse for kilde til respiration |
| 3 | Alarmgrænseknapper for respiration |

Opsæt EKG/impedansrespiration

1. Tryk på fanen **Settings** (Indstillinger).
2. Tryk på fanen **Setup** (Opsætning).
3. Tryk på den lodrette fane **ECG** (EKG).
4. Juster følgende indstillinger efter behov:
 - EKG-forøgelse. Vælg den ønskede forøgelse.
 - Kurvehastighed. Vælg den ønskede kurvehastighed.
 - Filter. Tryk på valgboxen for at aktivere eller deaktivere Filter.
 - Brug EKG som respirationsfrekvenskilde, når det findes. Tryk på valgboxen for at aktivere eller deaktivere impedansrespiration. Apparatet måler kun impedansrespiration ved overvågning i afledning II.

5. Indstil detektering af pacemaker efter behov. Tryk på valgboxen for at aktivere eller deaktivere visning af pacemakerspidser som vist her.



ADVARSEL Risiko for patientens sikkerhed. Indstil detektering af pacemaker korrekt. En pacemakerpuls kan blive talt som et QRS, hvilket ville kunne medføre en forøget hjerterefrekvens og manglende registrering af hjertestop og visse livstruende arytmier (V-Tach, V-Fib og asystoli). Hvis din patient har pacemaker, skal du indstille detektering af pacemaker til ON (Til) for at undgå denne risiko, og pacemakerpatienter skal holdes under tæt observation.



Bemærk Standardindstillingen for Pacemaker detection (Detektering af pacemaker) er Off (Fra). Efter overvågning af en patient, hvor detektering af pacemaker er indstillet til On (Til), vender apparatet tilbage til standardindstilling, før den næste patient overvåges. Gå tilbage til fanen **Settings > Setup > ECG** (Indstillinger > Opsætning > ECG) for at aktivere detektering af pacemaker for en ny patient.

6. Tryk på fanen **Home** (Start).
De nye indstillinger træder i kraft med det samme.

Overvåg patienten

1. Tryk på **Start** i rammen ECG (EKG) for at begynde at optage en EKG-kurveform. Der går 3 til 5 sekunder, før kurveformen vises på skærmen. Hjerterefrekvensen vises også i rammen ECG (EKG).
2. Find EKG-afledningsbetegnelsen i rammen. Se efter en liste over tilgængelige afledninger, hvor den aktuelt valgte afledning er fremhævet.
3. Tryk et vilkårligt sted på kurveformen på skærmen for at vise en anden afledning. Kurveform og valgt afledning skifter, hver gang du trykker.
4. Fortsæt overvågning af EKG efter behov.

For oplysninger om alle produkter kan du kontakte Hillroms tekniske support: hillrom.com/en-us/about-us/locations/




Gem og gennemgå et snapshot af kurveformen

Snapshots af kurveformer uden alarmer

Du kan gemme snapshots af kurveformer uden alarmer i fanen Review (Gennemse). Snapshots af kurveformer uden alarmer gemmer 7 sekunders data før anmodningen.




Bemærk Du kan gemme ét snapshot af en kurveform i minuttet.

1. Tryk på  i rammen ECG (EKG), når du ser en kurveform, du vil gemme.
2. Tryk på fanen **Review** (Gennemse), og se ikonet for gemt kurveform  i rækken ECG (EKG).
3. Tryk på  for at åbne og gennemse snapshottet.
4. Tryk på **Print** (Udskriv) for at udskrive kurveformen, eller tryk på **Cancel** (Annuller) for at lukke snapshottet. Uanset hvad du vælger, vises fanen Review (Gennemse) igen.

Snapshots af kurveformer med alarmer

Der gemmes automatisk snapshots af kurveformer med arytmialarmer (V-Tach, V-Fib og asystoli) på fanen Review (Gennemse). Brugeren skal ikke gøre noget.

Bemærk følgende:

- Hvis "Print on alarm" (Udskriv ved alarm) er aktiveret i Advanced settings (Avancerede indstillinger), udskrives kurveformen automatisk, når den er blevet gemt.
- Ikonet for en gemt kurveform med en alarm vises med rødt  i tabellen i Review (Gennemse), hvilket angiver en alarm med høj prioritet.
- Kurveformer med alarmer gemmer 7 sekunders data før og 7 sekunders data efter en alarmhændelse (V-Tach, V-Fib og asystoli).
- I de 7 sekunder efter alarmerne, hvor der gemmes, kan du ikke ændre indstillinger (afledning, filter, forøgelse, detektering af pacemaker osv.).